

ELEKTRONICKÁ CHŮVIČKA S MOŽNOSTÍ MONITOROVÁNÍ POHYBU A DECHU BC-2000

Použití elektronické chůvičky se snímací deskou je snadné

1. Snímací desku umístíte pod matraci nebo podložku, na které dítě spí. Deska se těla dítěte vůbec nedotýká a nijak jej neovlivňuje.
2. Přístroj připevníte k postýlce, nebo jej pomocí prodlužovací šňůry zapojíte ve vedlejší místnosti.
3. Po uložení dítěte zapnete vypínač na přístroji. Každý nádech potvrdí zelená signálka bliknutím.
4. Kdyby došlo k výpadku dechu, nebo by dítě dýchalo velmi nepravidelně, začne houkat varovný signál a blikat červená kontrolka.

Upozornění

- Používejte pouze AC adaptéry dodávané spolu s přístrojem. Použití jiného AC adaptéru může způsobit zničení dětské chůvičky BC-2000.
- Pokud nebudete používat dětský monitor po delší dobu, pak z vysílače i přijímače vyjměte všechny baterie, předejdete tak zničení přístroje nebo vytečení baterií.
- Pokud není přístroj používán, vždy jej odpojte od síťového adaptéru.
- Přístroj by měl být používán pouze v podmínkách s okolní teplotou v rozmezí 5°C až 45°C.
- Nevystavujte dětskou chůvičku přímému slunečnímu záření nebo blízko zdrojů tepla, nepoužívejte ji také ve vlhkém nebo prašném prostředí.
- Pro čištění dětského monitorovacího systému používejte jemný čisticí prostředek a měkký hadřík. Nikdy nepoužívejte silné a drsné čisticí prostředky nebo chemická rozpouštědla.
- Nikdy přístroj nerozebírejte, uvnitř nejsou žádné opravitelné části.